



WoPeeH[®]-pocket

Women's Peeing Help
Plashulpmiddel voor vrouwen die staan!




omdat het nodig is...
omdat het handig is...
of gewoon omdat je het wilt...

Gebruiksaanwijzing


1. Open WoPeeH-pocket (Fig. 1)

Verwijder de **dop** van de invoeropening. **Trek (1)**, **draai (2)** en **trek (3)** het verlengstuk aan de voorkant helemaal open.

Figuur 1

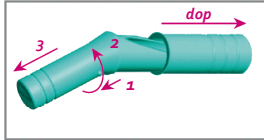

Figuur 2

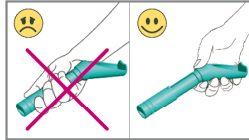

Figuur 3



2. Open je kleding

Maak je kleding open en duw je slip opzij (laat je broek niet zakken).

3. Duw WoPeeH tegen je aan (Fig. 2)

Houd je WoPeeH met één hand vast en plaats de invoeropening helemaal tegen je lichaam aan. Duw de achterkant **direct achter de vagina** tegen je huid aan.

4. Plassen (Fig. 3)

Richt de voorkant recht naar voren en naar beneden.
Je kunt nu plassen. ^{*1)}

5. Druppels verwijderen

Als je klaar bent dan schuif je je WoPeeH langs je lichaam naar voren en verwijder je alle achtergebleven druppels. (WC-papier niet nodig!)

^{*1)} **Als plassen niet lukt** kan het zijn dat je te hard duwt of dat de WoPeeH te ver naar voren is geplaatst. Verminder de druk of verplaats de WoPeeH een beetje naar achteren en probeer het opnieuw.

Belangrijk bij gebruik

- Let op:** Gebruik **niet te veel kracht** bij het openen. Je kunt dan het pinnetje van het verlengstuk beschadigen.
- Let op:** Probeer WoPeeH-pocket eerst uit in een vertrouwde omgeving (bv. bad of douche).
- Let op:** Besteed extra aandacht aan het **uitplassen van de laatste urine**. Oefen een paar keer om je blaas volledig te kunnen legen.
- Let op:** WoPeeH-pocket is uitsluitend geschikt voor **uitwendig gebruik**.
- Let op:** WoPeeH-pocket en het zakje zijn **geen** kinderspeelgoed.

Reinigingsadvies

Spoel je WoPeeH én de dop direct na gebruik af met schoon water. Als er geen schoon water in de buurt is: schud dan je WoPeeH goed uit en sluit hem af. Spoel de WoPeeH én de dop goed schoon zodra dit kan. Gebruik regelmatig een mild reinigingsmiddel voor een goede hygiëne.

Bewaarsadvies

Als je WoPeeH voor langere tijd niet gebruikt wordt: reinigen met een mild reinigingsmiddel en goed laten drogen. Bij voorkeur open bewaren.

Verkrijgbare kleuren



Summer Green Icy Blue Pretty Pink Minty Green Secret Black

Plastuitje WoPeeH-pocket

Is een plastuitje dat je kunt afsluiten met een dop.
Is bedoeld voor je persoonlijke hygiëne en geschikt voor langdurig gebruik.
Is makkelijk te reinigen en gemaakt van een stevige en milieuvriendelijke kunststof. ^{*2)}

^{*2)} Polypropyleen kan makkelijk worden hergebruikt en geeft bij verbranding geen schadelijke stoffen af.

